

## So einfach geht es:

### So setzen Sie Ihre Kontaktlinsen auf

Waschen Sie Ihre Hände gründlich. Nehmen Sie die Kontaktlinse aus dem Behälter und überprüfen Sie, ob sie nicht umgestülpt oder beschädigt ist. Setzen Sie die Kontaktlinse auf Ihre Fingerspitze, öffnen Sie das Auge und halten beide Lider fest. Legen Sie die Kontaktlinse auf die Hornhaut. Den Finger langsam entfernen und die Lider schließen.



### So nehmen Sie Ihre Kontaktlinsen ab

Ziehen Sie das untere Lid nach unten, senken den Kopf und schauen weit nach oben. Schieben Sie die Kontaktlinse vorsichtig nach unten auf das Weiße im Auge. Nehmen Sie die Kontaktlinse vorsichtig mit den Kuppen von Daumen und Zeigefinger ab, ohne dabei die Kontaktlinse zusammen zu drücken.



### So pflegen Sie Ihre Kontaktlinsen

Nach jedem Tragen müssen Ihre Kontaktlinsen gereinigt, desinfiziert und gelagert werden. Je nach Kontaktlinsentyp und Tragebedingungen werden unterschiedliche Produkte und Anwendungen empfohlen. Sie haben die Wahl zwischen All-In-One-Lösungen und Wasserstoffperoxid-Systemen. Die entsprechenden Pflegehinweise finden Sie auf den Verpackungen.



## Top Qualität mit UV-Schutz!



### SeeOne 55 Monatslinse

Die SeeOne 55 Monatslinse ist ein Allrounder unter den herkömmlichen Kontaktlinsen. Mit ihrem Wassergehalt von 55 % und ihrer Krümmung von 8,8 mm sorgt sie in den meisten Fällen für eine schnelle Eingewöhnung – auch wenn Sie von einer anderen Monatslinse wechseln.

Die Lenscare-Monatslinse ist für die unterschiedlichsten Tragebedingungen bestens geeignet. Ob Outdoor-Aktivitäten oder PC-Arbeit, die SeeOne 55 macht alles mit.

Bitte lassen Sie nach einem Wechsel der Marke den Sitz Ihrer neuen Kontaktlinsen vom Kontaktlinsenspezialisten überprüfen.

Kontaktlinsentyp	PFLEGEMITTEL				ERGÄNZUNGEN			
	Kombi-Lösung	Kombi-Plus	Kombi-MultiAction	Kombi-GEL-System	KomfortPlus 1-Schritt	Peroxid-Systeme	Nachbenetzung	Proteinentf.
Hyaluron-Linsen								
Silikon-Hydrogel-Linsen								
Wochen- und Monatslinsen								
Jahreslinsen								
Tageslinsen								
Empfindliche Augen/Allergiker								

### Lenscare Marken-Qualität

Wir garantieren Ihnen günstige Preise bei absoluter Qualität unserer produzierten und verkauften Artikel. Denn Qualitätsmanagement ist bei uns gelebte Unternehmensphilosophie. Beweis hierfür ist die jährliche Prüfung unserer Produktionsstätten und unseres Betriebes nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN 13485. Dieses Siegel garantiert höchste Qualität – bis hin zur Auswahl der Rohstoffe.



# Kontaktlinsen und Pflegemittel aus Ihrer Apotheke





## Lenscare – Einfach besser sehen

Sie tragen Kontaktlinsen? Dann kennen Sie bereits das herrliche Gefühl, ohne drückende Brillenbügel oder beschlagene Gläser zu leben. Sie wissen, dass Sie ohne Einschränkungen in Ihrem Gesichtsfeld Auto fahren oder Sport treiben können. Sie suchen eine modische Sonnenbrille spontan aus – ohne auf teure Brillengläser in Ihrer Stärke warten zu müssen!

Kennen Sie auch die hochwertigen Kontaktlinsen und Pflegemittel von Lenscare? Wenn nicht, können Sie diese gleich hier in Ihrer Apotheke mitnehmen und ausprobieren. Sie werden sehen: Das weiche Material und die ausgeklügelte Passform unserer Monatslinse SeeOne 55 sorgen in den meisten Fällen für bequemen Sitz und eine schnelle Eingewöhnung. Mit dem integrierten UV-Schutz tun Sie Ihren Augen zusätzlich etwas Gutes.

Ob praktische All-In-One-Lösungen oder ein Peroxid-System, das ohne Konservierungsstoffe auskommt und damit auch für Allergiker geeignet ist: Wir haben für alle Kontaktlinsenträger die passende Pflege im Sortiment.

## All-In-One-Lösungen



### Kombi-GEL-System

All-In-One-Lösung mit benetzendem Hyaluron. Hyaluron ist ein natürlicher Wirkstoff, der in der Tränenflüssigkeit vorkommt und für hervorragenden Tragekomfort sorgt.

### Kombi-Lösung

Bewährte und preisgünstige All-In-One-Lösung, die eine optimale Verträglichkeit zum kleinsten Preis bietet.



### Kombi-MultiAction

Multifunktionale All-In-One-Lösung mit integrierter Proteinentfernung. Der enthaltene Benetzungswirkstoff sorgt für ein gutes Tragegefühl auch nach vielen Stunden.

## Peroxid-1-Schritt-Systeme



### ClearSept

Katalysator-System mit 3%iger Peroxid-Lösung, das sich durch eine intensive Reinigungswirkung auszeichnet. Ohne Konservierungsstoffe und deshalb auch für Allergiker geeignet!

### Komfort-Plus

Tabletten-System, das eine besonders gründliche und sichere Reinigung garantiert. Der Farbindikator zeigt die erfolgte Neutralisation der Peroxid-Lösung bereits nach 2 Stunden an. Ohne Konservierungsstoffe!



### Allgemeiner Hinweis

Alle Kontaktlinsen-Pflegemittel von Lenscare sind perfekt auf bewährte Kontaktlinsen abgestimmt. Schützen Sie Ihre Kontaktlinsen und damit Ihre Augen vor Verunreinigungen und schädlichen Ablagerungen.

## Ergänzende Pflege



### Kochsalzlösung

Zum Abspülen und zur kurzfristigen Zwischenlagerung aller Kontaktlinsen. Ideal auch als preiswerte Ergänzung zu Peroxid-Systemen und für die Anwendung von Proteinentfernungstabs (PentaZyme).

### Drops Hyaluron

Nachbenetzungstropfen mit nachbenetzendem Hyaluron verbessern den Tragekomfort von Kontaktlinsen. Der natürliche Wirkstoff Hyaluron stabilisiert den Tränenfilm und sorgt so für Erleichterung bei müden Augen oder Trockenheitsgefühl.



### PentaZyme

Reinigungstabletten für eine saubere und gründliche Proteinentfernung. Eine wöchentliche Anwendung wird empfohlen. Für alle Kontaktlinsen geeignet.

